

Стерилизатор за инструменти с висока температура КН-360В

Стерилизатор за инструменти с висока температура КН-360В е надеждно и ефективно устройство за **стерилизация и дезинфекция** на метални инструменти чрез суха топлина. Проектиран за професионална и домашна употреба, той осигурява хигиенично, безопасно и без химикали решение за маникюристи, козметици, фризьори, стоматолози и всички, които работят с режещи или манипулационни инструменти. ♦ **Вътрешен обем:** 1,5 л

♦ **Мощност:** 500 W

♦ **Таймер:** до 90 мин., регулируем

♦ **Температурен диапазон:** 0–250 °C, регулиране през 5 °C

♦ **Електронен дисплей:** лесно управление на температурата и времето

♦ **Бърза стерилизация:** достатъчни са ~15 мин. при 125 °C за ефективно унищожаване на бактерии и микроорганизми

♦ **Захранване:** 100–120 V/60 Hz или 220–240 V/50 Hz

♦ **Размери на тялото:** 12 × 30 × 17 см

♦ **Размери на вътрешния контейнер:** 25 × 12 × 7 см ⚡ Сухата топлинна стерилизация е доказано ефективен метод за унищожаване на бактерии, вируси и други микроорганизми чрез висока температура, без използване на химически разтвори или вода.

Инструкции за употреба

Подготовка преди стерилизация

1. Почистете и подсушете инструментите преди поставяне – те не трябва да съдържат влага или органични остатъци за оптимална стерилизация.
2. Подредете инструментите **равномерно и без застъпване** в металната кошница на уреда.

Стартиране на стерилизация

1. Свържете уреда към електрическата мрежа и включете главния бутон.
2. Настройте **температурата** според типа инструменти (например **125 °C за 15 мин.** при ежедневни метални инструменти).
1. Задайте **времетраене** с помощта на таймера.
2. Натиснете **старт** – дисплеят ще покаже текущите настройки и стартира цикъла.
3. Стерилизацията приключва автоматично при изтичане на времето.

След стерилизация

- ✓ Изключете уреда и го оставете да се охлади най-малко **10–15 минути** преди да извадите инструментите.
- ✓ Използвайте специалните **метални инструменти или ръкавици**, за да извадите кошницата – става много горещо!

Мерки за безопасност

- ◆ Не докосвайте горещи повърхности по време и след цикъла – риск от изгаряне.
 - ◆ Дръжте далеч от деца и неопитни потребители.
 - ◆ Не поставяйте инструменти с изолация или пластмасови части, които не са устойчиви на висока температура.
 - ◆ Не отваряйте капака по време на работа на висока температура.
 - ◆ След употреба изключете от електрическата мрежа и оставете напълно да изстине.
 - ◆ Използвайте уреда само върху стабилна, топлоустойчива повърхност.
 - ◆ Ако уредът се повреди или е с нарушено захранващо кабелно окабеляване, **не го използвайте**.
-  Винаги спазвайте инструкциите на производителя и не модифицирайте уреда самоволно.



Поддръжка и почистване

- Редовно почистване на вътрешността с мека, суха кърпа.
- Не използвайте вода или агресивни почистващи средства вътре в камерата.
- Проверявайте електрическите връзки и кабели периодично за износване.

За кого е подходящ

- ✓ Професионални салони за красота
- ✓ Фризьорски и маникюристи
- ✓ Медицински кабинети и студия
- ✓ Домашна употреба за лични инструменти

Производител: Yiyu Pongfeng Electronics, China, Jinhua, Zhejiang

Вносител: ВМ 1715 ЕООД, София, тел. 0878222291, email: pretttyzone@gmail.com

ЗАБРАНА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ В ОБЩ КОНТЕЙНЕР

Уведомяваме Ви, че изхвърлянето на електрически и електронни уреди в общи контейнери за смет е строго забранено. Според закона за управление на отпадъците и за опазване на околната среда, такива уреди трябва да се депозират в специализирани за тях контейнери или да бъдат предадени в оторизирани пунктове за рециклиране. Неспазването на тази забрана води до санкции, съгласно действащото законодателство. Молим всички клиенти да се съобразяват с правилата и да допринасят за опазването на околната среда! **ВНИМАНИЕ:** Не употребявайте уреда във вода!! Това може да бъде опасно и да доведе до повреда на уреда или дори до риск от електрически удар.

